



Regarnissage / collage

Pour une bonne adhérence, privilégiez un brûleur à gaz de commerce. La flamme chaude provoque une fusion de surface, sans ramollir la gouttière. (Un brûleur à gaz atteint environ 1600°C.)

Malgré une courbe d'apprentissage pour estimer la bonne durée, cette technique est facile.

La flamme est rapidement dirigée sur la surface. Il est important d'appliquer immédiatement le monomère!



Tenir la gouttière avec des pincettes sur les bords. Le brûleur à gaz (selon les modèles avec une distance de 3-5 cm) doit toujours rester en mouvement, comme une peinture aérosol. Balancez quatre ou cinq fois par des mouvements avant/arrière, avec un angle suffisant et légèrement modifié. Le traitement à la flamme dure moins de 10 secondes pour la liaison totale.

Gardez le monomère prêt pour l'application. Les monomères sont facilement inflammables, aucune bouteille ouverte de monomère ne doit se trouver à proximité.

La gouttière est refroidie afin que le matériel de regarnissage ne durcisse pas trop rapidement.

Bien sûr, la surface activée ne doit pas être contaminée par la suite.

Gary Unterbrink DDS